

DOSIERTABELLE

für Heck Hygiene Instrumentendesinfektionsmittel in Konzentratform

venticid ID forte



KONZENTRATION	WASSER	KONZENTRAT	EINWIRKZEIT	
1 %	990 ml	10 ml	5 Minuten	Vaccinia-/Adeno-Viren
			30 Minuten	Polyoma-Viren
			60 Minuten	Instrumentendesinfektion gem. VAH (bakterizid, levurozid, tuberkulozid) (hohe organische Belastung)
1,5 %	985 ml	15 ml	30 Minuten	Instrumentendesinfektion gem. VAH (bakterizid, levurozid, tuberkulozid) (hohe organische Belastung)
2%	980 ml	20 ml	15 Minuten	Instrumentendesinfektion gem. VAH (bakterizid, levurozid, tuberkulozid) (hohe organische Belastung)
			30 Minuten	Wirksam gegen alle behüllten und unbehüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV: gem. RKI/DVV, Polio-Virus
			2 Stunden	sporizid (Bacillus subtilis) (qualitativer Suspensionsversuch)

KONZENTRATION	WASSER	KONZENTRAT	EINWIRKZEIT	
1 %	990 ml	10 ml	5 Minuten	Ultraschallbad
			60 Minuten	bakterizid inkl., MRSA, fungizid (C. albicans)/ levurozid gem. VAH, Tuberkulose-Bakterien (M. terrae), wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV/Influenza-/Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)
2 %	980 ml	20 ml	30 Minuten	bakterizid inkl., MRSA, fungizid (C. albicans)/ levurozid gem. VAH, Tuberkulose-Bakterien (M. terrae), wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV/Influenza-/Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)
3 %	970 ml	30 ml	15 Minuten	bakterizid inkl., MRSA, fungizid (C. albicans)/ levurozid gem. VAH, Tuberkulose-Bakterien (M. terrae), wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV/Influenza-/Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)

ventisept M plus



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.