

DESINFEKTIONSPLAN für die Zahnarztpraxis

	WAS	WOMIT	MENGE / EINWIRKZEIT	WIE	WANN	WER
	Hygienische Händedesinfektion	<input type="checkbox"/> sanocid <input type="checkbox"/> sanocid gel <input type="checkbox"/> sanocid plus	konz. 30 Sekunden	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.	Vor allen medizinischen Maßnahmen am Patienten. Nach Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Chirurgische Händedesinfektion	<input type="checkbox"/> sanocid <input type="checkbox"/> sanocid gel <input type="checkbox"/> sanocid plus	konz. 1,5 Minuten	Desinfektionsmittel aus Direktspender portionsweise in die trockenen Hände geben. Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.	Vor Operationen.	An der Operation beteiligte Personen
	Hautschutz	ventisan protect	konz.	Creme sorgfältig einmassieren. Kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Nagelfalze unbedingt berücksichtigen.	Vor Tätigkeiten mit Feuchtigkeitskontakt. Vor dem Tragen von Schutzhandschuhen. Nach den Pausen.	Alle Mitarbeiter
	Händewaschung	<input type="checkbox"/> ventisan <input type="checkbox"/> ventisan care <input type="checkbox"/> ventisan med	konz.	Haselnussgroße Menge an Waschlotion aus dem Spender entnehmen und in die angefeuchteten Hände geben und aufschäumen. Nach der Händewaschung Hände gründlich abspülen und sorgfältig trocknen.	Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und bei sichtbarer Kontamination	Alle Mitarbeiter
	Hautpflege (Hände)	ventisan cream	konz.	Creme sorgfältig einmassieren. Kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Nagelfalze unbedingt berücksichtigen.	Nach jedem Händewaschen. In den Pausen und nach Arbeitsende. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	manuelle Instrumentendesinfektion	ventisept M plus	3,0 % 15 Min. 2,0 % 30 Min. 1,0 % 60 Min.	Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) oder ein Ultraschallbad mit gebrauchsfertiger Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unterfließendem Wasser abspülen und trocknen. Herstellerangaben beachten!	Direkt nach Gebrauch.	benannte Person
	Rotierende Instrumente	ventisept B plus	konz. 15 Minuten	Instrumente in die gebrauchsfertige Lösung einlegen. Sämtliche zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen von der Lösung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit Wasser abspülen und weiter aufbereiten.	Direkt nach Gebrauch.	benannte Person
	Hand- und Winkelstücke, Turbinen Außenflächen	<input type="checkbox"/> ventisept liquid AF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF wipes <input type="checkbox"/> ventisept pur wipes	konz. 2 Minuten	Die alkoholbeständigen Gegenstände abwischen. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig benetzt sein.	Direkt nach Gebrauch.	benannte Person
	Absauganlagen	ventimed forte	2,0 % 15 Minuten	Zum Ansetzen der Gebrauchslösung 20 ml Konzentrat in 980 ml heißem Wasser (mind. 40-60 °C) lösen und direkt absaugen.	Am Ende des Behandlungstages. Ggf. auch in den Pausen.	benannte Person
	getragener Zahnersatz	ventalgin	konz. 5 Minuten	Materialien 5 Min. in die Lösung einlegen, anschließend mit Wasser abspülen.	Nach Erhalt vom Patienten, vor Laborversand.	benannte Person
	Abformungen	ventalgin	konz. 5 Minuten	Werkstücke aus Alginaten und Hydrokolloiden kurz eintauchen und anschließend 5 Min. abtrocknen lassen. Andere Materialien 5 Min. in die Lösung einlegen, anschließend mit Wasser abspülen.	Nach Erhalt vom Patienten, vor Laborversand. Herstellerangaben beachten!	benannte Person

Merke: Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten! Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen! Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Beim Umgang mit Blut, Fäzes und Auswurf sind generell die Hände mit Einmalhandschuhen vor direktem Kontakt zu schützen. Die TRBA 250 und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden! Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Praxisstempel / Datum / Unterschrift

DESINFEKTIONSPLAN für die Zahnarztpraxis

	WAS	WOMIT	MENGE / EINWIRKZEIT	WIE	WANN	WER
	Behandlungsliegen / -stuhl, patientennahe Flächen	<input type="checkbox"/> ventisept forte NF ^{1.)} <input type="checkbox"/> ventisept F ^{2.)} <input type="checkbox"/> ventides GF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF wipes <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF ready wipes <input type="checkbox"/> ventisept pur wipes	^{1.)} ^{2.)} konz. 1 Min. } konz. 2 Min. } konz. 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Auf Herstellerangaben achten!	Nach Patientenwechsel. Desinfektion am Ende des Arbeitstages.	Alle Mitarbeiter
	Einmal-Auflagen med. / techn. Geräte	<input type="checkbox"/> ventisept forte NF ^{1.)} <input type="checkbox"/> ventisept F ^{2.)} <input type="checkbox"/> ventides GF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF wipes <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF ready wipes <input type="checkbox"/> ventisept pur wipes	^{1.)} ^{2.)} konz. 1 Min. } konz. 2 Min. } konz. 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Auf Herstellerangaben achten!	Nach Patientenwechsel. Nach Gebrauch / Benutzung. Herstellangaben beachten!	benannte Person
	Oberflächen, z. B. Arbeitsflächen, Inventar, Türgriffe	<input type="checkbox"/> ventisept forte NF ^{1.)} <input type="checkbox"/> ventisept F ^{2.)} <input type="checkbox"/> ventides GF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF wipes <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF ready wipes <input type="checkbox"/> ventisept pur wipes	^{1.)} ^{2.)} konz. 1 Min. } konz. 2 Min. } konz. 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen.	Bei Kontamination. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Fußboden	<input type="checkbox"/> ventisept forte NF ^{1.)} <input type="checkbox"/> ventisept F ^{2.)}	^{1.)} ^{2.)}	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode, z. B. Bezugs-Wechsel-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Kontamination. Bei Bedarf. arbeitstäglich	benannte Person
	Waschbecken	<input type="checkbox"/> ventisept forte NF ^{1.)} <input type="checkbox"/> ventisept F ^{2.)} <input type="checkbox"/> ventides GF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF wipes <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF ready wipes <input type="checkbox"/> ventisept pur wipes	^{1.)} ^{2.)} konz. 1 Min. } konz. 2 Min. } konz. 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf. arbeitstäglich	benannte Person
	Toiletten	<input type="checkbox"/> ventisept forte NF ^{1.)} <input type="checkbox"/> ventisept F ^{2.)} <input type="checkbox"/> ventides GF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF wipes <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF ready wipes <input type="checkbox"/> ventisept pur wipes	^{1.)} ^{2.)} konz. 1 Min. } konz. 2 Min. } konz. 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Gesonderte Putzutensilien einsetzen.	Bei Bedarf. arbeitstäglich	benannte Person
	Abfalleimer	<input type="checkbox"/> ventisept forte NF ^{1.)} <input type="checkbox"/> ventisept F ^{2.)} <input type="checkbox"/> ventides GF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF wipes <input type="checkbox"/> ventisept liquid AF ready wipes <input type="checkbox"/> ventisept pur wipes	^{1.)} ^{2.)} konz. 1 Min. } konz. 2 Min. } konz. 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder sind einzuhalten. Abfälle in gut schließenden Behältnissen sammeln und mindestens einmal täglich entsorgen.	Bei Bedarf.	benannte Person

^{1.)} ventisept forte NF:
 1,0% 5 Minuten
 0,75% 15 Minuten
 0,5% 30 Minuten
 0,25% 240 Minuten

^{2.)} ventisept F:
 7,5% 1 Minute
 2,5% 15 Minuten
 1,0% 60 Minuten

Merke: Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten! Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen! Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Beim Umgang mit Blut, Fäzes und Auswurf sind generell die Hände mit Einmalhandschuhen vor direktem Kontakt zu schützen. Die TRBA 250 und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden! Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.